

**MÁSCARA REUTILIZÁVEL BRANCA
FRGMSK-05**

Descrição:

Máscara de proteção nível 2 com elásticos laterais, três dobras e clip nasal para ajuste. Composta por 1 camada de tecido. Não estéril. Reutilizável até 10 lavagens.

Imagem do Produto:



Características do Produto:

Máscara de proteção reutilizável, leve e respirável, composta por 1 camada de tecido composto por 80% poliéster e 20% de poliamida, hidrófugo – repele a água e as microgotas atuando como barreira para vírus e bactérias. Capacidade de filtração superior a 90% pelo que é adequada a profissionais, que não sendo da saúde, estão em contacto frequente com o público.

Este produto é fabricado com tecido criteriosamente selecionado, proveniente da indústria europeia e devidamente certificado. As costuras são termocoladas.

Cor: Branco

Tamanho: Standard para Adulto (17,5cm x 9,5cm)

- Cumprimento da EN 14683:2019 (Anexo B e Anexo C)
- Cumprimento da norma europeia CWA 17553:2020



Instruções de uso:

A máscara deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara.
- Colocação da máscara em frente à cara, segurando pelos elásticos. A parte de fora da máscara (a que não fica em contacto com a face) é a parte que tem as pregas viradas para baixo. O fixador nasal deve ficar na parte de cima da máscara. Nesta máscara os elásticos estão colocados do lado de fora, para um melhor ajuste.
- Coloque os elásticos nas orelhas e desdobre a máscara de forma a cobrir todo o rosto desde o queixo até ao nariz.
- Ajuste a faixa moldável na parte superior do nariz.
- Após utilização a máscara deverá ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar.
- Deverá ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

Instruções de lavagem:

10 ciclos

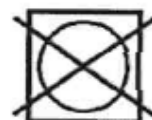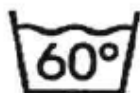

Vida útil: o ciclo de vida da máscara é de 10 lavagens para garantir as suas propriedades iniciais.

No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara de acordo com as condições acima e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.

Instruções conservação:



25°C a 40°C



< 80%

Em caso de defeito ou dano não use o produto, substitua por outro.

Limitações ao uso: Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento UE/2016/425).



FICHA DE PRODUTO

Fabricado em Portugal por:

Fergotex – Fábrica de Malhas Texteis, Lda. | Avenida Conde de Arnoso Nº 1831, 4770-526 Arnoso Santa Maria |
PT 501481583