



MÁSCARA COMUNITÁRIA DESCARTÁVEL FRGMSK-01

Descrição:

Máscara de proteção com elásticos laterais, três dobras e clip nasal para ajuste. Composta por três camadas de TNT em Polipropileno. Não estéril. Uso único.

Imagem do Produto e Embalagem:





The packaging layout includes the following text elements:

- Top Panel:** MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS, MADE IN PORTUGAL, 50 UNIDADES.
- Front Panel (Left):** PT Máscara de proteção, com elásticos laterais, três dobras e clip nasal. Não estéril. 3 Camadas em TNT - Polipropileno. Cumprimento da norma EN 14683:2019. EN Protection face mask, with lateral elastics, three folds, single use. Not sterile. 3 Layers of TNT - Polypropylene. CE Máscara protectora, con elastos laterales, tres pliegues y clip nasal. No estéril. 3 capas en TNT - polipropileno. Cumplimiento de la norma EN 14683:2019. MÁSCARA COMUNITÁRIA NÍVEL 3.
- Front Panel (Center):** INSTRUÇÕES DE USO (with icons for use, disposal, and recycling).
 - PT Coloque a máscara com o nariz à cara segurando pelas alças laterais e ajuste os elásticos e o clip nasal. Não toque na máscara nem no nariz.
 - EN Place the mask in front of the face holding the side elastics, the elastic and fitting the nose with the nose clip.
 - ES Coloque la máscara delante del cara sujetando por las alcorcas laterales, y ajuste los elásticos laterales y el clip nasal.
 - PT Coloque a máscara com o nariz à cara segurando pelas alças laterais e ajuste os elásticos e o clip nasal.
 - EN Place the mask in front of the face, and adjust the mask to cover the face from the correct position.
 - ES Coloque la máscara delante del cara sujetando por las alcorcas laterales y ajuste los elásticos laterales y el clip nasal.
 - PT Ajuste a fíbula nasal na parte superior do nariz.
 - EN Adjust the nosebridge part at the top of the nose.
 - ES Ajuste la brida nasal en la parte superior del nariz.
- Front Panel (Right):** FACE MASKS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS, EN 14683:2019, 50 UNIDADES. Includes icons for CE, RECYCLED, and other standards.
- Bottom Panel:** PRODUCED IN PORTUGAL.

Características do Produto:

Máscara de proteção descartável, leve e respirável, composta por 3 camadas de tecido não tecido: 2 tecidos iguais, 1 de cor azul na parte exterior e 1 na cor branco na parte interior e um tecido intermédio no meio destas 2 camadas que funciona como filtro de proteção de bactérias >70%.

Fabricado em Portugal

Cor: Azul/Branco

Tamanho: Standard para Adulto (17,5cm x 9,5cm)

- Cumprimento da EN 14683:2019 (Anexo B e Anexo C)
- Cumprimento da norma europeia CWA 17553:2020
- Relatório Analítico Nº AR-20-YL-007362-01 (emitido por Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U.)

Instruções de uso:

A máscara deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara:

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara.
- b) Colocação da máscara em frente à cara, segurando pelos elásticos, com a parte branca virada para a face com o fixador nasal para cima.
- c) Coloque os elásticos nas orelhas e desdobre a máscara de forma a cobrir todo o rosto desde o queixo até ao nariz.
- d) Ajuste a faixa moldável na parte superior do nariz.
- e) Após utilização a máscara deverá ser descartada num local apropriado.
- f) Deverá ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

O produto é de utilização única. Não reutilizar.

Não usar mais de 4 horas consecutivas, devendo ser trocadas sempre que se encontrem húmidas.

Instruções conservação e manutenção:

Os produtos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardadas de potencial contaminação.

Em caso de defeito ou dano não use o produto, substitua por outro.